


# Revo-S™ SC1 SC2 SU

Protocole Opérateur  
Operating Protocol  
Operatives Protokoll


**SC1** N°25 6%  
L 21 mm



**SC2** N°25 4%  
L 21 - 25 - 29 mm

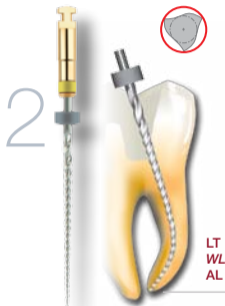

**SU** N°25 6%  
L 21 - 25 - 29 mm

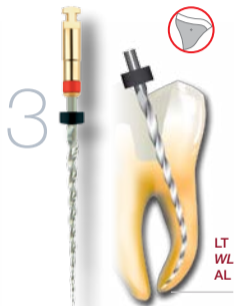

Vitesse de rotation : 250 - 400 tr/min - Couple maxi : 0.8 N.cm  
Maxi torque: 0.8 N.cm

Rotation speed: 250 - 400 rpm -  
Motorgeschwindigkeit: 250 - 400 U/min - Max. Drehmoment: 0.8 N.cm

À titre indicatif uniquement For indication only  
Gilt nur für Anzeige

**MICRO-MEGA®**

5-12, rue du Tunnel - 25006 Besançon Cedex - France  
Tél. : +33 (0)3 81 54 42 42 - Fax : +33 (0)3 81 54 42 39  
mmb@micro-mega.com - [www.micro-mega.com](http://www.micro-mega.com)



5 10 15 20 25 30 mm



# Revo-S™ AS30 AS35 AS40

**AS30** N°30 6%  
L 21 - 25 - 29 mm



**AS35** N°35 6%  
L 21 - 25 - 29 mm



**AS40** N°40 6%  
L 21 - 25 - 29 mm



Vitesse de rotation : 250 - 400 tr/min - Couple maxi : 0.8 N.cm  
Maxi torque: 0.8 N.cm

Motorgeschwindigkeit: 250 - 400 U/min - Max. Drehmoment: 0.8 N.cm

Rotation speed: 250 - 400 rpm -

Your Endo Specialist™

CE 0459

Année apposition marquage CE / Year of CE-marking /  
CE-Kennzeichnung: 2008

Séquence endodontique pour traitement (SC1, SC2, SU) et finition (AS30, AS35, AS40).  
Endodontic sequence for treatment (SC1, SC2, SU) and finishing (AS30, AS35, AS40).  
Endodontische Sequenz für Erstbehandlung (SC1, SC2, SU) und abschließende  
Wurzelkanalausarbeitung (AS30, AS35, AS40).

